登全醫事檢驗所 XR-110

登全醫事檢驗所通告

公告編碼:104001

公告日期:104年 01 月 15 日

公告事項:Testosterone 方法變更、參考區間修正;新增項目:食物不

耐 IgG4 過敏原檢測;採檢注意事項;

1. Testosterone 自即日起更换分析方法、參考區間如下:

健保編號:09121C 睪丸酯醇免疫分析

健保點數:150 自費收費:400

檢體採集:Serum,採檢前的準備不須空腹,靜脈採血不加任何抗凝劑,血液完全凝固後,離心

分離出血清至少 0.5mL。檢體於 2-8℃可存放 48 小時或-20℃長期保存。

報告時效:每天

分析方法: Chemiluminescence Immunoassay (CLIA), DPC Immulite 2000, SIEMENS。

參考區間:F: ovulatory: <20 - 73 ng/dL, Post menopausal: <20 - 43 ng/dL

M: 20-49 歲 160 - 726 ng/dL, ≥ 50 歲 129 - 767 ng/dL

(原参考區間: F: 20-49 歲 8-50 ng/dL, ≥50 歲 3-40 ng/dL; M: 20-49 歲 330-805 ng/dL, ≥50 歲 273-816 ng/dL)

2. 新增項目:食物不耐 IgG4 過敏原-套組

自費收費:3800

檢體採集:Serum,採檢前的準備不須空腹,靜脈採血不加任何抗凝劑,血液完全凝固後,離心

分離出血清至少 2mL。

報告時效:5天

分析方法:BioIC Analyzer

3. 採檢注意事項:

3.1 檢體類別:一般生化血清項目為採血管檢體 3-5mL,視項目需求;

血糖為灰頭管 1-1.5mL,含抗凝劑務必混合均勻;

CBC/HbA1C/G6PD 為紫頭管 1.5-3mL,含抗凝劑務必混合均勻。

請參考檢驗申請單,如有疑問歡迎來電洽詢。

- 3.2 請依開列項目收集檢體:103 年度檢體多送/缺件數量高達近兩千支,造成報告延誤及浪費資源,請各單位配合採檢規定,避免檢體錯誤產生,影響報告品質。
- 3.3申請單務必填寫送檢單位、病人姓名、生日等個人資料,項目請勾選/填寫清楚,避免錯誤延誤報告。感謝配合!

謹此告知

登全醫事檢驗所 敬上

登全醫事檢驗所 JY17060013 醫檢師 劉燈煌